



## ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ «ДУОСКИН» Флакон (спрей)

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного содержимого и мочи, и повреждения, вызванного частой заменой средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

Благоприятно воздействует на кожу вокруг стомы, не вызывая жжения и раздражения.

Подходит пациентам с чувствительной кожей, склонной к раздражению

Форма выпуска: флакон (спрей), 50 мл.  
РУ №РЗН 2024/23648 от 16.09.2024

- Надежно защищает кожу вокруг стомы, образуя тонкую эластичную полупроницаемую пленку
- Не препятствует фиксации изделий с клеевой основой, а также отклеиванию адгезивной пластины кало-/уроприемника
- Высыхает в течение нескольких секунд, устойчива к воздействию воды
- На силиконовой основе, не содержит спирт и латекс

## ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ВО ФЛАКОНЕ

- Возможность обработки поверхности большой площади и труднодоступных участков
- Флакон оснащен экономичным и удобным дозатором

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Очистите и аккуратно просушите кожу



Хорошо встряхните флакон перед использованием



Держите флакон на расстоянии примерно 10 см от участка кожи, который необходимо обработать. Подождите несколько секунд до высыхания



Наложите пластину калоприемника (см. инструкцию)

### ВАЖНО!

Защитную пленку необходимо наносить каждый раз для надежной защиты кожи при смене средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

Перед фиксацией (приклеиванием) адгезивных изделий убедитесь, что нанесенная пленка полностью высохла.

Защитная пленка «Дуоскин» предназначена для использования со всеми видами пластин кало- и уроприемников различных типов.

