



Рекомендовано пациентам с чувствительной кожей, склонной к раздражению

ПАСТА-ГЕРМЕТИК «ДУОСКИН» БЕЗ СПИРТА

Предназначена для герметизации клеевой основы кало-/уроприемника, выравнивания неровностей на коже вокруг стомы, защиты от протекания и предотвращения повреждения парастомальной кожи.

Благоприятно воздействует на кожу вокруг стомы, не вызывая жжения и раздражения.

Форма выпуска: туба 60 г.

РУ №РЗН №2024/23647 от 16.09.2024

- Паста-герметик на гидроколлоидной основе способствует сохранению и поддержанию здоровья кожи вокруг стомы, заполняет неровности, прочно фиксирует пластину кало-/уроприемника
- Надежная герметизация зоны стыка пластины и кожи у основания стомы предотвращает ее повреждение, затекание отделяемого под пластину и преждевременное отклеивание
- Обладает высоким уровнем абсорбции влаги, не затвердевает и не высыхает
- Благодаря оптимальной плотности и консистенции легко наносится, создает плотный эластичный барьер, может использоваться с любыми видами пластин кало-/уроприемников
- Не содержит латекс
- В комплекте прилагается удобный шпатель для равномерного нанесения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Очистите и аккуратно просушите кожу



Наложите пластину калоприемника (см. инструкцию)



Откройте крышку, выдавите пасту-герметик из тубы



Плотно закройте крышку тубы во избежание высыхания пасты-герметик


Пасту-герметик можно нанести:



влажным пальцем
или удобным шпателем



непосредственно на кожу
вокруг стомы или на пластину
кало-/уроприемника

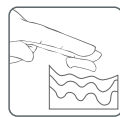

ВАЖНО!

Если поверхность кожи неровная, впадины слишком глубокие, рекомендуется наносить пасту-герметик послойно. На каждое нанесение отведите около 30 секунд.

Паста-герметик удаляется вместе с пластиной при замене кало-/уроприемника. Допустимо оставить частицы пасты-герметик на коже при замене кало-/уроприемника.

*При ощущении дискомфорта можно удалить остатки пасты-герметик теплой водой или очистителем для кожи вокруг стомы.

