



ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ «ДУОСКИН» Салфетки

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного содержимого и мочи, от повреждающего воздействия, вызванного частой заменой средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

Благоприятно воздействует на кожу вокруг стомы, не вызывая жжения и раздражения.

Подходит пациентам с чувствительной кожей, склонной к раздражению

Форма выпуска: салфетки, 30 шт.
РУ №РЗН №2024/23647 от 16.09.2024

- Надежно защищает кожу вокруг стомы, образуя тонкую эластичную полупроницаемую пленку
- Не препятствует фиксации изделий с клеевой основой, а также отклеиванию адгезивной пластины кало-/ уроприемника
- Высыхает в течение нескольких секунд, устойчива к воздействию воды
- На силиконовой основе, не содержит спирт и латекс

САЛФЕТКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

- Компакты и гигиеничны
- Индивидуальная упаковка удобна в путешествиях и поездках

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Очистите и аккуратно просушите кожу



Надорвите индивидуальную упаковку



Нанесите пленку на поверхность кожи, требующую защиты.
Подождите несколько секунд до высыхания



Наложите пластину калоприемника
(см. инструкцию)

ВАЖНО!

Защитную пленку необходимо наносить каждый раз для надежной защиты кожи при смене средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

Защитная пленка «Дуоскин» предназначена для использования со всеми видами пластин кало- и уроприемников различных типов.

